


Fonctionnalités de votre mini-microphone sans fil Cochlear

Entendre à distance dans des situations d'écoute difficiles, telles que :



- dîner au restaurant
- réunions
- cours de gymnastique
- à l'école et en classe
- voyages en car, bus ou train

Méthode :

Donnez le mini-microphone à la personne que vous voulez écouter et demandez-lui de le placer près de sa bouche en le fixant verticalement à ses vêtements à l'aide de la pince de fixation. Activez ensuite la fonction sans fil de votre processeur Baha.

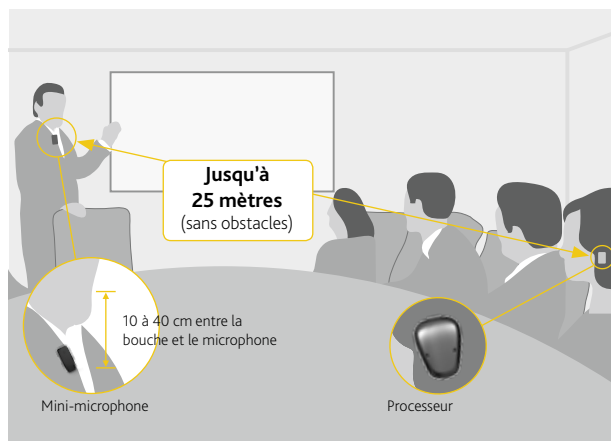

Présentation du produit

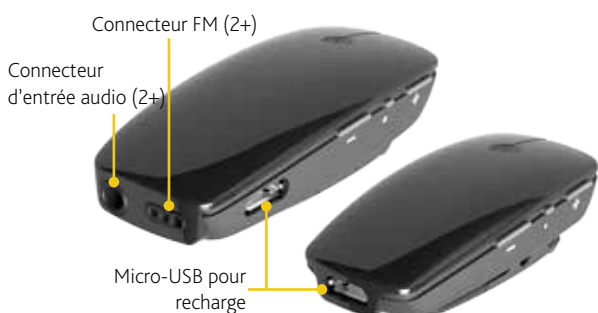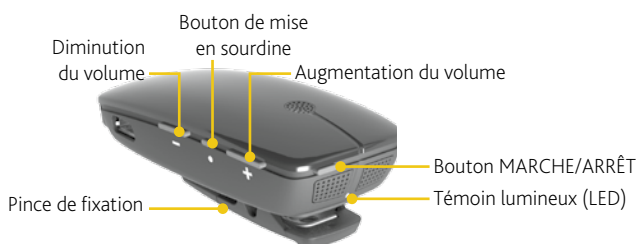

Premiers pas

Vérifiez avec votre audioprothésiste que votre processeur a été appairé avec votre microphone. Les processeurs pré-appairés ne doivent pas être appairés à nouveau.

Si votre processeur n'est pas pré-appairé, voyez ci-dessous les instructions vous permettant de l'appairer facilement avec votre microphone.

Conseil ! Assurez-vous que le volume de votre processeur est réglé à un niveau confortable avant de modifier les réglages à l'aide de la commande du volume du microphone.

Charge de la batterie

Chargez la batterie pendant au moins 3 heures avant d'utiliser votre microphone pour la première fois, même si les témoins de batterie indiquent qu'elle est complètement chargée.

Le chargeur peut rester branché une nuit ; il n'y a aucun risque de surcharge de la batterie.

Remarque : En moyenne, une charge assure le fonctionnement du microphone pendant un maximum de 10 heures. L'autonomie dépend de l'utilisation.

Entendre la TV ou la radio

Méthode :

Placez le microphone près du haut-parleur du téléviseur ou de la radio. Pas besoin de le raccorder à une sortie de casque.



Appariement avec un processeur

Vous pouvez appairer jusqu'à trois dispositifs Cochlear sans fil avec votre processeur Cochlear. Sélectionnez un canal séparé pour chaque dispositif appairé avec le processeur.

- A** Désactivez votre processeur Cochlear.
- B** Activez votre microphone.



- C** Appuyez une fois sur le bouton d'appariement (deux fois pour le canal 2, trois fois pour le canal 3) à l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire. La LED d'état clignote en jaune et le dispositif passe en mode d'appariement pendant 20 secondes.



- D** Le nombre de clignotements de la LED dans chaque séquence correspondra au canal choisi pour l'appariement du microphone (deux clignotements : canal deux, trois clignotements : canal trois).



- E** Pendant que le dispositif est en mode d'appariement, activez votre processeur.

- F** La réussite de l'appariement est signalée par une mélodie audible dans le processeur ou par un témoin clignotant sur le processeur (selon le type de processeur).

Utilisation de votre mini-microphone sans fil Cochlear

Démarrage de la communication sans fil

1. Activez le microphone et votre processeur.
2. Appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/du programme du processeur et maintenez-le enfoncé pendant environ trois secondes.

Lorsque la fonction sans fil est activée, une mélodie audible ou le clignotement d'un témoin (selon le type de processeur) sera suivi de la transmission du signal audio sans fil via le microphone.

Démarrage de la communication sans fil d'un deuxième ou d'un troisième accessoire sans fil Cochlear

Si votre processeur est appairé avec plusieurs dispositifs sans fil, appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/de programme et maintenez-le enfoncé une 2ème ou une 3ème fois pour accéder au 2ème ou au 3ème dispositif sans fil Cochlear.

Arrêt de la fonction sans fil

Appuyez sur le bouton de la fonction sans fil/de programme du processeur. Le processeur revient au dernier programme utilisé.

Désactivation du microphone

1. Pour désactiver le signal, appuyez sur le bouton de mise en sourdine. La LED de désactivation du microphone clignote en jaune pendant la mise en sourdine.
2. Pour réactiver le signal, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de mise en sourdine.

Remarque : le redémarrage du microphone en mode sourdine réactivera le signal.



Fonctions supplémentaires du mini-microphone 2+

Le mini-microphone 2+ offre également des options de connectivité à des sources audio étendues.

Boucle à induction

La boucle à induction intégrée, permet de recevoir les signaux audio transmis par un système à boucle à induction (disponible dans certains cinémas, écoles, églises, etc.).



FM

Un récepteur FM externe raccordé via le connecteur FM. Pour utiliser ce mode, insérer une entrée audio directe Europin ou un récepteur FM dans le connecteur FM.



Entrée audio

Une source audio externe (smartphone, tablette, ordinateur portable, TV, etc.) peut être raccordée via le connecteur d'entrée de ligne.

Pour utiliser ce mode, insérez le câble avec prise jack fourni dans le connecteur d'entrée de ligne et insérez l'autre extrémité du câble dans la sortie AUDIO OUT du dispositif audio externe.

Transmettre l'audio à votre processeur

Méthode :

Insérez une extrémité du câble avec prise jack dans l'entrée audio du microphone et l'autre dans la sortie audio de votre appareil audio (ordinateur, lecteur MP3 ou système Hi-Fi).



Changement de mode

Pour visualiser le mode de fonctionnement en cours, appuyez une fois sur le bouton de mode. La LED du mode correspondant à l'arrière du microphone s'allume.

Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton de mode et continuez jusqu'à ce que le mode souhaité soit activé.

Remarque :

- Les modes d'entrée de ligne et FM ne peuvent être sélectionnés que si un câble ou des récepteurs FM sont insérés dans le microphone.
- Le microphone passe automatiquement en mode d'entrée de ligne lorsqu'une fiche mini-jack est insérée.
- Le microphone passe automatiquement en mode FM lorsqu'un récepteur FM ou une entrée audio directe est inséré.



Les accessoires sans fil Cochlear sont compatibles avec certains processeurs Cochlear. Voir www.cochlear.com pour obtenir des informations complètes sur la compatibilité.

Tous les produits ne sont pas disponibles sur tous les marchés. La disponibilité des produits est soumise à l'approbation des autorités de réglementation des différents marchés.


Assistance

Pour plus d'informations sur les mini-microphones sans fil Cochlear, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le processeur Cochlear Baha, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur, partie A.

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

www.cochlear.com

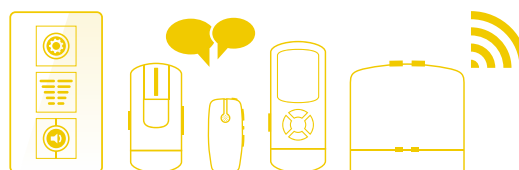

Consultez www.cochlear.com pour découvrir toute notre gamme d'appis et d'accessoires sans fil.